

Абсорбент натронная известь FS980 (Alba Healthcare)

Инструкция по применению.

Использование:

- 1) Заполните абсорбер НДА абсорбентом до метки, или до уровня примерно на 5 мм ниже верхней границы абсорбера. Особенности заполнения абсорбера той или иной модели НДА сверяйте с инструкцией к аппарату. После заполнения абсорбера гранулы должны образовывать ровный уровень. После заполнения абсорбера плотно закройте канистру и храните согласно инструкции. Абсорбент можно использовать в течение 1 месяца после вскрытия при хранении в плотно закрытой канистре. Если НДА с заполненным абсорбентом абсорбером не использовался 1 месяц и более, то абсорбент необходимо заменить, так как он потерял часть своих свойств и не пригоден к использованию.
 - 2) В процессе использования происходит поглощение углекислоты гранулами абсорбента. При этом цвет гранул меняется с серого на фиолетовый. При изменении цвета гранул на фиолетовый натронную известь необходимо заменить. Абсорбент необходимо использовать в комбинации с мониторингом уровня CO_2 в дыхательной смеси. Если концентрация CO_2 во вдыхаемой газовой смеси достигнет 5 мм рт. ст., требуется незамедлительно заменить абсорбент, даже, если его цвет не изменился. Также, цветовой индикатор при неиспользовании абсорбента может регенерировать, что не означает восстановление его свойств. Рекомендуемый поток свежего газа не менее 1 л/мин.
 - 3) Совместимость: кислород, закись азота, галотан, энфлуран, изофлуран, севофлуран, десфлуран, ксенон. Не совместимы с трихлорэтиленом и хлороформом, чистым CO_2 . Не допускайте чрезмерного высыхания абсорбента, пропускания через него излишне сухой дыхательной смеси – это может привести к экзотермической химической реакции и образованию токсичных химических веществ. При использовании рекомендуется использовать дыхательные контуры с дыхательными фильтрами с ТВО.
 - 4) После использования немедленно утилизируйте. Повторное использование не допускается.
 - 5) Может вызвать раздражение при попадании на кожу и слизистые. Используйте перчатки и другие средства защиты. При попадании на кожу обильно промойте водой с мылом. При попадании в глаза обильно промойте несколько раз. Контактные линзы рекомендуется снять. При необходимости обратитесь к врачу.
 - 6) Состав: гидроксид кальция (более 80%), гидроксид натрия (0,1%), фиолетовый этил, вода (до 15% массы).
 - 7) Объем поглощаемого CO_2 140 л/кг.
 - 8) Вид: гранулы бело-серого, серого цвета диаметром $2,5\text{--}5,0 \pm 0,25$ мм, при истощении свойств цвет меняется на фиолетовый.
 - 9) Тара: канистра объемом 5 л, вес $4,5 \pm 0,2$ кг.
 - 10) Условия хранения: в чистом сухом месте при температуре $+5/+40^\circ\text{C}$.
 - 11) Утилизируется как отходы класса Г - химотходы.
-